



Mantieni il tuo Sorriso Sempre al TOP!



BLANCONE®

One more reason to Smile

Raccomandazioni dopo il trattamento di sbiancamento dentale

Avvertenze

I trattamenti BlancOne® sono molto delicati e sicuri. In rari casi è possibile sperimentare sensibilità o irritazione gengivale successivamente allo sbiancamento dentale. Si tratta generalmente di effetti leggeri e transitori, in caso contrario contattate il vostro dentista.

Subito dopo il trattamento la superficie del dente potrebbe essere più permeabile. Per prevenire rapide ripigmentazioni evitare l'uso di tabacco, liquirizia, caffè, tè o vino rosso per almeno 6 ore.

Mantenimento

Esegui regolarmente la seduta di igiene orale dal tuo igienista dentale o dentista per evitare l'accumulo di placca e tartaro. Ricorda che una regolare seduta di igiene orale, evita una serie di patologie ed anche la pigmentazione del tuo smalto.

Lava regolarmente i tuoi denti con spazzolino, filo interdentale, scovolino o doccia orale.
Un dente pulito è anche più bianco.

Fai attenzione a caffè, tè, vino, liquirizia e altri alimenti coloranti il cui consumo regolare può macchiare i tuoi denti.

Evita di fumare e ricorda che dentifrici e collutori contenenti clorexidina possono macchiare i tuoi denti se usati per periodi prolungati.

Per mantenere il tuo sbiancamento usa prodotti sbiancanti e remineralizzanti di qualità.

Nella linea BlancOne® RITUALS puoi trovare tutti i prodotti per prenderti cura della salute e bellezza del tuo sorriso ogni giorno. Fatti consigliare dal tuo professionista di fiducia e mantieniti ben distante da miscele fatte in casa o prodotti di dubbia provenienza proposti on line.



**Scopri i rituali BlancOne®
di salute e bellezza
per il tuo sorriso!**



Centro Autorizzato BlancOne®

Note

BLANCONE®

www.blancone.eu